

最速!自宅・職場で即検査可能

## 継続できるリーズナブルな料金 日頃の感染対策に最適です!

変異株 対応

精度 97.5%

試験研究を目的としておりますので、治療や診断にはお使いいただけません。 日々の健康管理サポートツールとしてご使用ください。

1 キット【個包装】 2,000円 (税別) 送料別

\* 20キット以上でご購入いただけます。

## 新型コロナウイルスとインフルエンザが一度で検査できる

インフルエンザA型/B型の検出



#### キット内容

- サンプルカード 1 枚
- 下チップ1個

#### 【本抗原検査キットのメリット】

- ☑ 自分で簡単に検査できる
- ☑ 通常ゴミとして廃棄できる
- ☑インフルエンザと新型コロナウイルスがツインチェックできる
- ~ *ご*参考まで ~
- PCR検査は高額なものが多く、結果が出るまで時間がかかり 陽性の場合、医療機関から保健所へ通報する義務が生じます。
- ■抗体検査は企業購入の場合、産業医の認可が必要で、針等 を使用するキットは、医療廃棄物として処理しなけばならない。



発熱時や体調不良時、保健所に相談する際に「抗原検査キットで陰性でした」と報告した場合 発熱外来or一般内科の診療判断にも役立ち、医療現場への余計な負担を軽減することにも つながります。



#### ☑ 従業員の定期的な検査として



☑ 従業員や家族を守るために



☑ 研修会議や出張の前後に



### お問合せ

株式会社ミーティング・インフォメーション・センター

TEL 03-3663-5615 https://www.mic-n.co.jp/

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-1-11 【受付時間】 平日10:00~18:00


## 1 内容物の確認と準備






- カセット 1枚
- 2 緩衝液
- 3 検査チューブ・滴下チップ
- 4 滅菌綿棒
- 6 取扱説明書

2年間保管可能

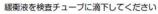

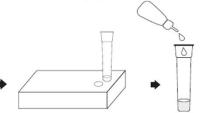

外箱の裏面にミシン目が入っております。 そこに検査チューブを挿し込み立てるようにすると簡単です。

#### 検体の採取

\*2通りの採取方法があります。どちらかをお選びください


#### 鼻で検査する場合



※綿棒を1~2cm程、鼻に入れて粘液(粘膜)を採取 してください。綿棒を回転させながら4~5回程擦ると 採取しやすくなります。

#### 口で検査する場合

#### 口腔粘膜検査

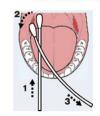

滅菌綿棒を軽く回転させながら、 粘膜を綿棒にしみ込ませるように、 舌の上や舌の裏を 15~20 秒程度 擦ってください。


#### 3 検体の抽出

綿棒を緩衝液の入った検査チューブに入れて、5~6回程かき混ぜ、綿棒と液を馴染ませ、 1分待ちます。1分後、検査チューブから綿棒を抜きます。


#### 6回転



#### これで準備完了!

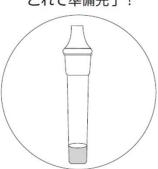

### 検体の滴下・反応

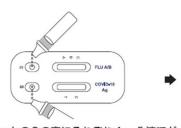

検査キットのSの窓にそれぞれ4~5滴ほど 検査液を滴下してください。

# 000 COVID-19 000

全体が徐々に染まり始めます。

# 00 σ COVID-19

約5分でラインがはっきり 確認できます。

#### 新型コロナウイルス For COVID-19



PCR 検査とともに 確定診断を推奨します





0 0







\*20 分以上経過したものは判定無効となります。

確定診断を推奨します

ウイルス未検出